

Droge alveolitis?  
Verzacht de pijn.



*Alveogyl*

Alveolair verband



Alveogyl is het ideale verband bij droge alveolitis: het verzacht snel de pijn van uw patiënt en is gemakkelijk in gebruik. Alveogyl kan ook onmiddellijk na de extractie worden gebruikt.

Alveogyl wordt aangebracht in één simpele stap en zonder hechtingen, het lost vanzelf op en vraagt geen intensievere opvolging van het genezingsproces. Het heeft een kalmerende werking op het alveolair weefsel en verzacht snel de pijn. De penghawarvezels hebben een fibreuze structuur, waardoor Alveogyl gemakkelijk kan worden aangebracht en het product goed hecht aan de alveole.

Kenmerken	Voordelen	Weldaden
Alveolair verband	Bevordert hemostase door compressie	Verzacht snel de pijn Beschermt tegen superinfectie
Bevat penghawarvezels	Fibreuze structuur	Goede hechting aan de alveole tijdens het genezingsproces
Geen hechting nodig	Gewone opvolging van het genezingsproces volstaat	Gemakkelijk in gebruik
Oplosbaar	Klaar in één stap	Geen opvolgingsafspraken nodig

## Indicaties

Alveogyl is een pasta die wordt gebruikt als alveolair verband bij droge alveolitis of na een moeilijke of traumatische extractie bij patiënten met een voorgeschiedenis van droge alveolitis.

## Instructies voor gebruik

- Neem een klein bolletje (ongeveer 0,20 g) Alveogyl-pasta
- Breng het voorzichtig aan in de voorbereide alveole
- Niet hechten



## Productinformatie

Pot 10 g

Alveogyl is een medisch hulpmiddel van de klasse IIa – CE0459

**Septodont** – Grondwetlaan 87 - 1083 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 425 60 37 – Fax: +32 (0)2 425 36 82  
Bezoek onze website voor meer informatie:  
[www.septodont.be](http://www.septodont.be) – [www.septodont.nl](http://www.septodont.nl)

