

Uw NIEUWE Septodont **koudespray**



CryoPulp

Spray de froid
Cold Spray

(FR)

Type d'application :
Le spray de froid contient pour le soulagement de la douleur dentaire un gel rapide de pellets en méthacrylate synthétique, pour le traitement des dents dans le domaine de la dentisterie et pour le refroidissement de matériaux pour empreintes, comme l'hydrocolloïde, etc.

Consignes d'utilisation :
Pulvériser l'objet à refroidir à une distance d'environ 2 à 3 cm pendant 1 à 2 secondes. Ne pas appliquer directement dans la bouche. Utiliser de gel ! Utiliser seulement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Consignes de sécurité :
H 222 - H 229 Aérosol extensible inflammable. Réchauffement sous pression - peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, étincelles, des flammes nues, toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer le produit. Ne pas utiliser après usage. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou toute autre source d'inflammation. Cesser l'usage hors de la portée des étincelles.

SEPTODONT
www.septodont.com

PRISMAN, G. & F.
Oto-Hahn-Str. 9, 47
64653 Lorsch, Germany
Tel. +49 (0) 69 48 88 88

CryoPulp

Koudespray
met munt aroma



CryoPulp - de nieuwe koudespray van Septodont

CryoPulp is geschikt voor het snel bevriezen van katoenen watjes voor de gevoeligheidstest van de pulpa in de tandheelkunde en het koelen van afdruk-/gietmateriaal, zoals bijvoorbeeld hydrocolloïde, enz.

Eigenschappen	Plus punten	Voordelen
Applicatie stuk	Doelgericht spray	Eenvoudig & veilig gebruik
Butaan-propaangas	Goede koeling	Efficiënt
Muntgeur	Aangenaam	Patiëntacceptatie

Hoe te gebruiken:



Neem een watje



Spuit 1-2 sec van op 2-3 cm afstand



Breng het watje aan op het midden van het tandoppervlak. Aangrenzende of contralaterale «normale» tanden moeten ook worden getest.

Productinformatie

- 200 ml
- Uitlaattemperatuur $\leq -40^{\circ}\text{C}$
- Klasse I medisch hulpmiddel
- Artikelnummer: 10601X



Verdeler:

Septodont NV-SA - Grondwetlaan 87 – 1083 Brussel - België

Tel. : +32 (0)2 425 60 37 - Fax : +32 (0)2 425 36 82

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.septodont.be - www.septodont.nl

