





Racegel

Krachtig gingivaal management



RACEGEL IS DE ENIGE THERMOGELIFIEERBARE GEL DIE EEN DROGE EN ZUIVERE OMGEVING BIEDT VOOR ELKE PROCEDURE WAAR EEN GOEDE GINGIVALE PREPARATIE VEREIST IS.

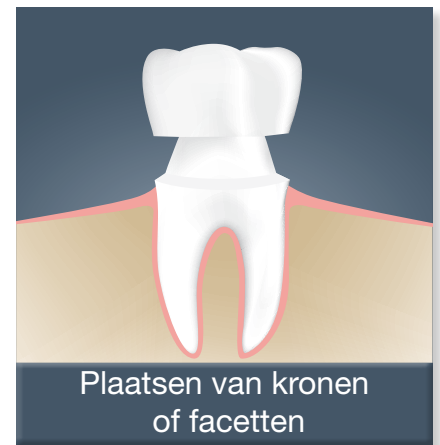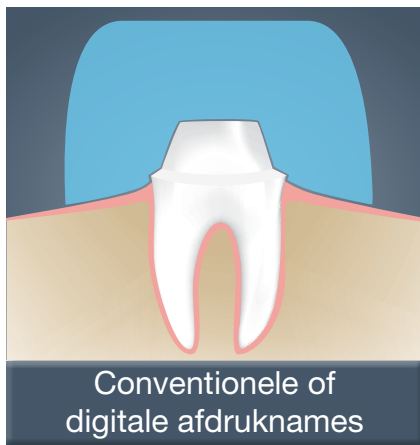

Geïntegreerd adstringerend effect

- Contractie van zacht weefsel dankzij 25% aluminiumchloride
- Optimale controle van bloedingen zonder verkleuring van de gingiva
- Subgingivale caviteitsranden goed bereikbaar
- Geen bijkomende hemostatische producten nodig
- Creatie van een **droge en zuivere omgeving**




Vóór het aanbrengen van Racegel



Na het aanbrengen van Racegel: droge en zuivere gingiva

Atraumatische gingivale preparatie

- **Van vloeistof tot gel:** unieke thermogelifieerbare viscositeit:
 - Bij kamertemperatuur (20 °C) is Racegel vloeibaar in de spuit
 - De viscositeit van Racegel stijgt naargelang van de temperatuur
 - Bij contact met mondweefsel (35 °C) neemt de viscositeit van Racegel toe en wordt het meteen een gel

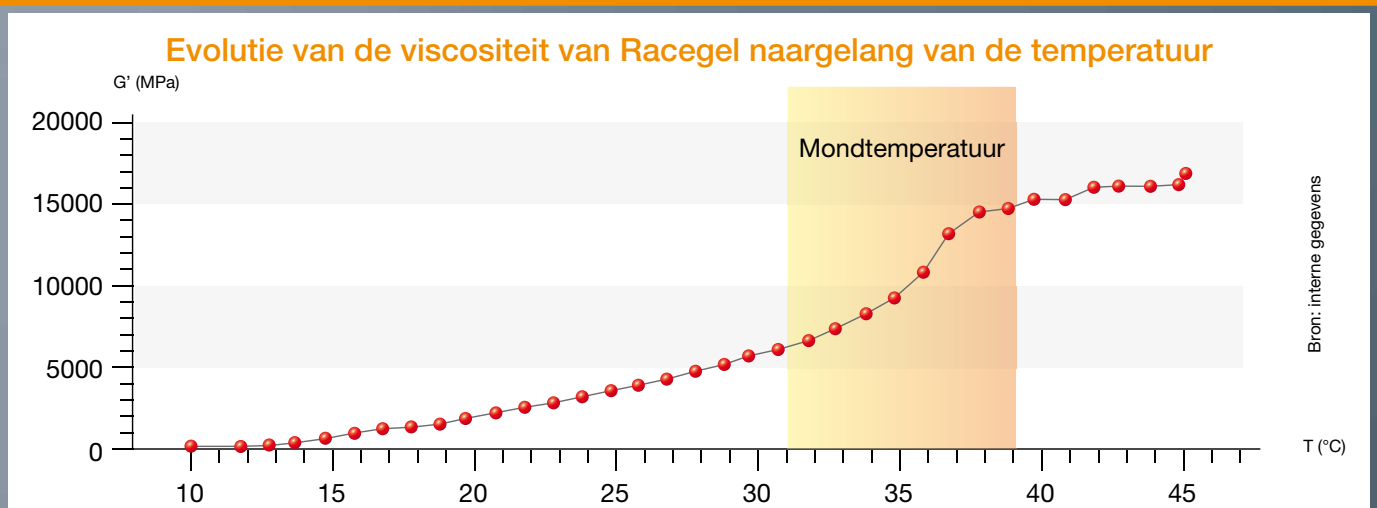

Gemakkelijke, snelle en nauwkeurige plaatsing

- **Kant-en-klare spuitjes** met voorgebogen tips
- **Gemakkelijk in de sulcus in te spuiten gel**
- De gel **druipt niet en loopt niet** uit tijdens de plaatsing
- **Goed zichtbare gel** dankzij zijn oranje kleur



Gebruik van retractiedraadjes optioneel bij een diepe subgingivale voorbereiding

Snel en nauwkeurig afspoelen

- **Omkeerbare thermogelifieerbare** viscositeit:
 - De viscositeit van Racegel neemt af wanneer er gespoeld wordt met koud water
 - Eenvoudig weg te spoelen zonder opnieuw bloeding te veroorzaken



Minimale retractie en toch kwaliteitsvolle afdruknames




Minimale, doch toereikende gingivale retractie voor een nauwkeurige bepaling van de cervicale randen om keer op keer de hoogste kwaliteit bij afdrukname te garanderen.

Racegel

de efficiënte manier om al uw
gingivale preparaties uit te voeren

Racegel vs. Retractiepasta	Racegel vs. Hemostatische producten	Racegel vs. Retractiedraadjes
Vergt geen bijkomend hemostatisch producten	Blijft op zijn plaats, druipt niet en loopt niet uit	Laat zich gemakkelijker en sneller aanbrengen
Garandeert de hoogste kwaliteit bij afdrukname met een minimale gingivaretractie	Veroorzaakt geen verkleuring van de gingiva	Eenvoudige reiniging zonder opnieuw bloeding te veroorzaken
Geen nood aan specifiek instrumentarium	Garandeert de hoogste kwaliteit bij afdrukname met een minimale gingivaretractie	Garandeert de hoogste kwaliteit bij afdrukname met een minimale gingivaretractie
Smaakt naar frambozen voor een optimaal patiëntencomfort	Handig kant-en-klaar aanbrenghsysteem	Behoudt de integriteit van de epitheliale aanhechting

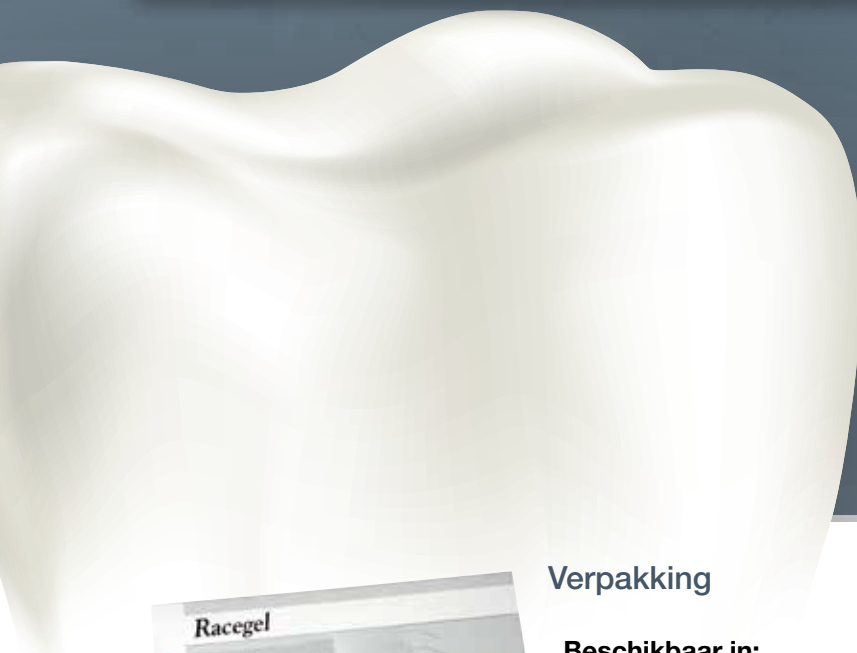

Verpakking

Beschikbaar in:

- doos van 3 spuitjes en 30 voorgebogen tips



The Dental Pharmaceutical Company

INNOVATIVE, SAFE AND EFFECTIVE SOLUTIONS FOR DENTISTRY WORLDWIDE

SEPTODONT NV-SA • Grondwetlaan 87 • B-1083 Brussel

Voor België : Tel. 02 425 60 37 • Fax 02 425 36 82 • info@septodont.com • www.septodont.be

Voor Nederland : gratis nummer: 00800 2 425 60 37 - Fax: +32 (0)2 425 36 82 • info@septodont.com • www.septodont.nl