

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



DO's & DON'Ts




Gebruik niet de Ultra Safety Plus zwarte handgreep



Gebruik enkel de Ultra Safety Plus Twist™ handgreep

Draai niet aan de naalddop tijdens het verwijderen ervan

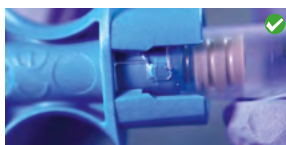

Vergrendel het handvat en de spuit samen door ze te draaien. Zorg ervoor dat ze gedurende de hele procedure vergrendeld blijven

Oefen geen overmatige druk uit tijdens de procedure



Vóór de injectie, verwijder de dop van de naald door deze recht er uit te trekken

Buig de twee onderdelen niet, om ze van elkaar te scheiden



Als u tegen het einde van het patroon weerstand voelt, stop dan met de injectie



Trek de plunjer volledig terug alvorens het apparaat te demonteren



Draai de cilinder om het systeem te ontgrendelen en trek de twee delen voorzichtig recht uit elkaar om ze te scheiden